

Nosocomia Surf +

Nettoyant désinfectant sols et surfaces

« dispositif médical »

Descriptif technique

Détergent désinfectant pour sols, surfaces, mobiliers, matériels et dispositifs médicaux non invasifs (lits médicaux, fauteuils roulants, stéthoscopes, fauteuils de dentistes, etc.).

Marché cible :

- milieu médical: dispositifs médicaux non invasifs
- milieu médical, collectivités, restauration, cuisines centrales: sols, surfaces et matériels.

- Formule sans aldéhyde, sans EDTA, sans isothiazolinone, sans CMR
- Conforme arrêté 08/09/1999 et textes ultérieurs
- Compatible avec auto-laveuses et centrales de dilution
- Large spectre d'activité
- Compatible inox, laiton aluminium et PVC
- Compatible avec revêtements de sol GERFLOR

Mode d'emploi

- Diluer le produit à 0,25% (soit une dose de 20mL dans un seau de 8L d'eau ou un sachet dose). Peut également s'utiliser à 0,5% en fonction de l'effet antimicrobien recherché.

- Utiliser à raison de 30 mL/m² en essuyage humide, pulvérisation, balayage humide, bionettoyage, auto-laveuse.

- Appliquer directement sur le dispositif médical non invasif ou à l'aide d'un chiffon

- Ne pas rincer

Rincer à l'eau potable les surfaces susceptibles d'être en contact avec des denrées alimentaires, et dans ce cas laisser agir avant rinçage selon l'activité microbiologique recherchée.

Caractéristiques

Aspect : liquide limpide incolore

Odeur : caractéristique

Densité : 1.00 – 1.02

Point d'éclair : >100°C

PH : alcalin

Propriétés microbiologiques

Bactéries - Levures - Virus

Conditionnement

Carton de 2 x 5L - Réf 100005