

# Nosocomia Surf + PAE

## Nettoyant désinfectant sols et surfaces

### « dispositif médical »

#### Descriptif technique

Spray détergent désinfectant pour surfaces, mobiliers, matériels et dispositifs médicaux non invasifs (lits médicaux, fauteuils roulants, stéthoscopes, fauteuils de dentistes, etc.).

Marché cible :

- milieu médical et paramédical: dispositifs médicaux non invasifs
- milieu médical, paramédical, collectivités, restauration, etc. : surfaces, mobilier et matériel.

- Formule sans EDTA, sans alcool, sans CMR, sans aldéhyde
- Conforme arrêté 08/09/1999 et textes ultérieurs
- Compatible toutes surfaces
- Prêt à l'emploi
- Ne laisse pas de trace

#### Mode d'emploi

- Prêt à l'emploi. Appliquer sur la surface à traiter ou sur un non tissé à raison d'environ +/- 6 mL/m<sup>2</sup> soit 10 pulvérisations.
- Essuyer si nécessaire.
- Ne pas rincer.

*Rincer à l'eau potable les surfaces susceptibles d'être en contact avec des denrées alimentaires, et dans ce cas laisser agir avant rinçage selon l'activité microbiologique recherchée.*

#### Caractéristiques

Aspect : liquide limpide incolore

Odeur : inodore

Densité : 0.978 - 1.018

Point d'éclair : >100°C

PH pur : 5.0 - 6.0

#### Propriétés microbiologiques

Bactéries - Levures - Virus

#### Conditionnement

Carton de 6 x 750ML - Réf 100006