

Septalkan Lingettes

Détergent désinfectant sans alcool

Pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces et des dispositifs médicaux

Usage par essuyage humide sur les surfaces (ex.: paillasses, charriots, mobilier), les équipements (ex.: moniteurs) et les dispositifs médicaux non immergeables, invasifs et non invasifs (ex.: sondes d'échographie, endoscopes gainés, générateurs d'hémodialyse, unit dentaire).

Action rapide : spectre d'activité atteint en seulement 5 minutes.

Elimine 99,999% des bactéries.

Actif sur les virus enveloppés tels que Coronavirus, VHB, VHC...

Respect des matériaux : pH neutre.

Respect de l'utilisateur : sans parfum, sans allergène.

Formule contact alimentaire.

Mode d'emploi

1. Sortir une lingette **Septalkan** du sachet.
2. Nettoyer minutieusement la surface à traiter.
3. Laisser le produit agir 5 minutes. Ne pas rincer (sauf surfaces avec contact alimentaire).
4. Jeter la lingette. Changer de lingette pour chaque équipement.
5. Bien refermer le sachet après utilisation.



Présentation commerciale

Sachet flow pack 100 lingettes (180x200mm)



USAGE PROFESSIONNEL

DENTIMED+

A Swiss Hygiene
Company

CE 0459
2013

DM Classe IIb

UFI : YMC7-20QQ-C004-Q358

Septalkan Lingettes

Détergent désinfectant sans alcool

Pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces et des dispositifs médicaux

Propriétés Microbiologiques

Conditions de saleté, 20°C

	TESTS	MICROORGANISMES	TEMPS DE CONTACT
Bactéries	EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	5 min
	EN 14561	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	5 min
	EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	5 min
	EN 13697	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia coli</i>	1 min
	EN 16615	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	5 min
Levures / champignons	EN 13624	<i>Candida albicans</i>	5 min
	EN 14562	<i>Candida albicans</i>	5 min
	EN 1650	<i>Candida albicans</i>	5 min
	EN 13697	<i>Candida albicans</i>	5 min
	EN 16615	<i>Candida albicans</i>	5 min
Virus	EN 14476	Adenovirus, Norovirus, Hépatite B, Hépatite C, HIV, Rotavirus	5 min
	EN 16777	Vaccine¹	5 min

¹Le Virus de la Vaccine est le virus représentatif des virus enveloppés présentés dans les annexes des normes EN 14476+A2 (2019), EN 16777 et EN 17111, comme par exemple : Virus de l'hépatite B (VHB) ; Virus de l'hépatite C (VHC) ; Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; Herpesviridae (Herpès virus) ; Coronavirus ; Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole ; ...

Composition

Lingettes pré-imprégnées, TP2/TP4, prêt à l'emploi. CHLORURE DE DIDECYL DIMETHYLAMMONIUM (CAS : 7173-51-5) à 0,25 g/kg, CHLORURE D'ALKYL (C12-16) DIMETHYLBENZYL AMMONIUM (CAS : 68424-85-1) à 0,95 g/kg.

Contient moins de 0,1% d'alcools.

Caractéristiques

- pH : 6,8 - 7,3
- Parfum : aucun
- Couleur : incolore

Précautions d'emploi

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Accédez aux informations produit.

DENTIMED+

A Swiss Hygiene Company

📍 Chemin du Croset 9c
CH 1024 Ecublens

☎ +41 21 861 38 73

✉ info@dentimed.ch