

Septalkan Lingettes


Détergent désinfectant sans alcool

Pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces et des dispositifs médicaux.

Avant utilisation, vérifier la date de péremption. Ne pas mélanger à d'autres produits.



- 1 Sortir une lingette **Septalkan** du sachet.

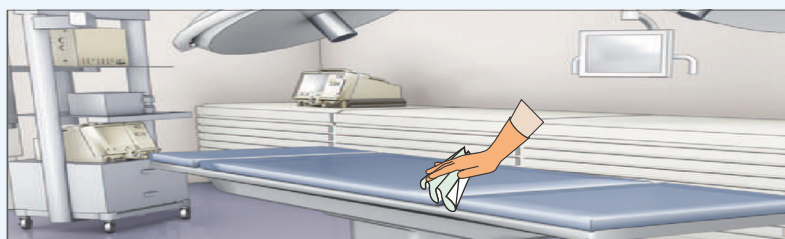

- 2 Nettoyer minutieusement la surface à traiter.
- 3 Laisser le produit agir 5 minutes. Ne pas rincer (sauf surfaces avec contact alimentaire).



- 4 Jeter la lingette.
Changer de lingette pour chaque équipement.
- 5 Bien refermer le sachet après utilisation.

Contient moins de 0,1% d'alcools.

UFI : YMC7-20QQ-C004-Q358



Description

Pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide sur les surfaces, les équipements et les dispositifs médicaux non immergeables, invasifs et non invasifs.

Spectre d'activité

Bactéricide ; levuricide ; actif sur Rotavirus, Norovirus, Adenovirus, actif sur les virus de l'Hépatite B, l'Hépatite C et le HIV, virucide contre les virus enveloppés tels que Herpès virus, Coronavirus, Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole, ...

Précautions d'emploi

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



Accédez aux informations produit.

Chemin du Croset 9c
CH 1024 Ecublens

+41 21 861 38 73

info@dentimed.ch

DENTIMED+
A Swiss Hygiene
Company



USAGE PROFESSIONNEL