

Steripro C & Steriwipes C

Détergent désinfectant

Pour le nettoyage et la désinfection
des surfaces et des dispositifs médicaux

Désinfection hautement efficace, par nettoyage manuel, en vue d'une prévention rapide et approfondie des infections, par exemple dans les cabinets médicaux et de médecine dentaire, au bloc opératoire pour la désinfection rapide de l'équipement, dans les moyens de transport et les ambulances, pour les vêtements chirurgicaux, dans les installations de protection civile et pour les surfaces de travail en laboratoire.

Solution hydroalcoolique à large spectre.

Efficacité antimicrobienne complète, y compris Coronavirus.

Séchage rapide: idéal entre 2 patients.

Compatibilité démontrée sur de nombreux équipements.

Mode d'emploi

Flacon

1. Pulvériser le produit sur la surface ou sur un non-tissé propre. 2. Nettoyer minutieusement la surface. 3. Laisser agir le produit. Ne pas rincer. 4. Changer de support non-tissé pour chaque équipement.

Lingettes

1. Sortir une lingette de sa boîte. 2. Nettoyer minutieusement la surface. 3. Laisser agir le produit. Ne pas rincer. 4. Changer de lingette pour chaque équipement.

Précautions d'emploi

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. DM Classe IIb.

Caractéristiques

- Etat physique : liquide
- pH : 7,0 +/- 0,5
- Parfum : Sans
- Couleur : Incolore

Composition

100 g de la solution contiennent:
71,25 g Ethanol
3,75 g Isopropanol

Présentation commerciale

- Bidon de 10 litres

- Sachets de 200 lingettes
(180 x 200 mm)

Spécie	Temps d'action
Bactéries	60 sec.
Mycobactéries	30 sec.
Fongicide	30 sec.
Virucide	30 sec.