

# Steripro Quick & Steriwipes

Détergent désinfectant

Pour le nettoyage et la désinfection  
des surfaces et des dispositifs médicaux

Désinfection hautement efficace, par nettoyage manuel, en vue d'une prévention rapide et approfondie des infections, par exemple dans les cabinets médicaux et de médecine dentaire, au bloc opératoire pour la désinfection rapide de l'équipement, dans les moyens de transport et les ambulances, pour les vêtements chirurgicaux, dans les installations de protection civile et pour les surfaces de travail en laboratoire.

**Solution hydroalcoolique à large spectre.**

**Actif sur coronavirus.**

**Efficacité antimicrobienne complète.**

**Séchage rapide: idéal entre 2 patients.**

**Compatibilité démontrée sur de nombreux équipements.**

## Mode d'emploi

### Flacon

1. Pulvériser le produit sur la surface ou sur un non-tissé propre. 2. Nettoyer minutieusement la surface. 3. Laisser agir le produit. Ne pas rincer. 4. Changer de support non-tissé pour chaque équipement.

### Lingettes

1. Sortir une lingette de sa boîte 2. Nettoyer minutieusement la surface. 3. Laisser agir le produit. Ne pas rincer. 4. Changer de lingette pour chaque équipement.

CHZN 1190  
CHZN 0666



## Présentations commerciales

- Spray 750 ml.
- Bidon de 5 litres
- Sachets de 200 lingettes (180 x 200 mm)
- Sachets de 100 lingettes (180 x 400 mm)



DENTIMED

certifié ISO 9001/13485



USAGE PROFESSIONNEL

# Steripro Quick & Steriwipes

Détergent désinfectant

Pour le nettoyage et la désinfection  
des surfaces et des dispositifs médicaux

## Propriétés Microbiologiques

	TESTS	MICRO-ORGANISMES CIBLES	TEMPS DE CONTACT
Bactéries	EN 13697	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus Enterococcus hirae, Escherichia coli</i>	1 min.
	EN 16615	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus Enterococcus hirae</i>	2 min.
	EN 16615	<i>Candida albicans</i>	5 min.
Fongicide	EN 13697	<i>Candida albicans, Aspergillus niger</i>	5 min.
	EN 14348	<i>Mico bactéricide (inclus M.Terrae - M.Avium)</i>	1 min.
	EN 14476	<i>Rotavirus</i>	1 min.
	EN 14476	<i>Norovirus</i>	5 min.
Virus	EN 14476	<i>Influenza A/H1N1</i>	10 sec.
	EN 14476	<i>Norovirus, HIV-1</i>	30 sec.
	EN 14476	<i>Hépatite C, Herpes virus</i>	30 sec.
	EN 14476	<i>Hépatite B, Rotavirus, Adenovirus</i>	30 sec.

### Composition

100 g de la solution contiennent:  
42,00 g Ethanol  
0,05 g Dimethyldidecylammoniumchlorid

### Caractéristiques

- Etat physique : liquide
- pH : 7,0 +/- 0,5
- Parfum : lemon
- Couleur : incolore

### Précautions d'emploi

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. DM Classe IIb.



DENTIMED

certifié ISO 9001/13485



USAGE PROFESSIONNEL

Dentimed Sàrl

Chemin du Croset 9c, 1024 Ecublens

Tél. +41 (0)21 861 38 73

info@dentimed.ch - www.dentimed.ch