



Detergente disinfettante per superfici, pronto all'uso senza alcol, 100% naturale e rinnovabile. Concepito per la manutenzione regolare e quotidiana, pulisce e disinfetta tutte le superfici resistenti all'acqua con un'unica passata.

Privo di cloro o candeggina, privo di ammonio quaternario. Attivo in 5 minuti su batteri, lieviti, funghi e virus rivestiti (A/H1N1, Coronavirus, HIV ecc.). Ecolabel, 100% biodegradabile <28 giorni.



Densité	COV%	pH
1.000	0	3



Campo di utilizzo

5Dnet assicura una risposta rapida, efficiente e totalmente ecologica per una disinfezione ottimale da batteri, lieviti e virus rivestiti.

La formula innovativa, frutto di anni di sviluppo, è stata testata e convalidata presso un laboratorio di analisi indipendente certificato. Approvato dall'UFSP come prodotto disinfettante.

Formula destinata a privati e professionisti per una perfetta disinfezione quotidiana sul posto di lavoro o in ambienti privati, adatta a tutte le superfici, tutti i supporti e tutti i materiali.

5Dnet è adatto a molte applicazioni, tra cui ad esempio:

- Industria, tecnologia medica e settore edile
- Settore ospedaliero e sanità pubblica, ad esempio ospedali, cliniche, studi medici
- Uffici, servizi, istituzioni, studi dentistici.
- Ambienti alimentari (settore HORECA, alberghiero, ristorazione, laboratori alimentari, cucina, catering, panetteria, macelleria...)
- Trasporti pubblici (autobus...) e privati (taxi...)
- Meccanica e officine

Può essere applicato a tutti i supporti, tra cui:

- Pavimentazioni e superfici sopraelevate.
- Superfici comuni nel settore alimentare: piastrelle, maiolica, acciaio inossidabile ecc.
- Materie plastiche e vernici.
- Elementi tecnici degli impianti di ventilazione (scambiatori, condizionatori, ...)
- Bicchieri e altri oggetti in ceramica ecc.
- Tessuti (rivestimento, tappeti, moquette, tende, abbigliamento, tappezzeria...)

ATTENZIONE: di pH acido, si consiglia di effettuare un test preliminare su superfici calcaree (marmo, travertino,

Référence	Emballage
5DNET-750	VAPO 750ML
5DNET-5	BB5L
5DNET-25	BB25L
5DNET-200	FUP200L
5DNET-1000	iBC 1000L



DENTIMED+

A Swiss Hygiene Company



REF 5DNET-750

REF 5DNET-5

UFI : MVRC-FQ56-W205-88PC

USAGE PROFESSIONNEL



SCHEDA TECNICA

Istruzioni per l'uso

Frequenza di applicazione: Quando necessario a seconda delle esigenze in termini di livello di igiene del sito. Il prodotto non deve essere miscelato con altri biocidi o prodotti per la pulizia.

Note:

Conservare a temperatura ambiente nella confezione originale, al riparo dalla luce solare e dal calore. Utilizzare i biocidi con attenzione. Prima dell'uso leggere l'etichetta e la scheda tecnica disponibile sul nostro sito.

Data la grande varietà di materiali, in caso di dubbi sulla natura o sulla resistenza della superficie considerata e delle a Efficacia disinfettante:

- Attività battericida (EN1276): Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae. condizioni di sporco, 5 minuti
- Attività battericida e lieviticida (EN13697): Candida albicans. Condizioni di sporco, 5 minuti
- Attività fungicida (EN1650): condizioni di sporco, 5 minuti
- Attività virucida (EN14476+ A1): Virus influenzale, Coronavirus, HIV, virus dell'herpes, virus dell'epatite. Condizioni di sporco, 5 minuti

Modalità d'uso consigliata:

1. Rimuovere lo sporco ostinato dalla superficie.
2. Applicare in modo uniforme sulla superficie.
3. Lasciare agire per il tempo consigliato (la superficie deve restare bagnata per tutto il tempo di contatto).
4. Risciacquare, asciugare o lasciare asciugare all'aria. Le superfici disinfettate che possono entrare a contatto con alimenti devono essere risciacquate con acqua potabile. Non è necessario risciacquare i pavimenti, a meno che non siano cerati o levigati.

Dosaggio consigliato:

Prodotto pronto all'uso, non richiede diluizione.

Tempo d'azione da osservare per un'efficacia ad ampio spettro: 5 minuti

Proprietà fisico-chimiche

Composizione: tensioattivi, acido lattico, profumo di menta.

Non contiene: ammonio quaternario o terziario, alcool, aldeidi, derivati clorurati (candeggina), perossido.

Prodotto convalidato per TP2 e TP4. Approvato per il settore alimentare.

Informazioni/Omologazione/Riciclaggio

Prodotto sicuro, non classificato secondo il GHS. Autorizzazione federale: OFSP: EU-0033224-0000

N° codice rifiuto VEVA/OMoD (CH): 07 06 01 - Tensioattivi, detersivi, saponi...

Per problemi particolari, contattare i nostri tecnici che sapranno consigliarvi senza impegno da parte vostra. Le informazioni contenute nelle presenti istruzioni sono fornite esclusivamente a titolo informativo e senza alcuna garanzia espressa. Poiché non è possibile alcun nessun controllo durante l'uso, non possiamo essere ritenuti responsabili per eventuali danni. Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti nella formulazione a scopo di miglioramento.



Accédez aux
informations
produit.
750 ml



Accédez aux
informations
produit.
5 L

📍 Chemin du Croset 9C
CH 1024 Ecublens

☎ +41 21 861 38 73

✉ info@dentimed.ch

📍 Avenue de Tourbillon 23
CH 1950 Sion

☎ +41 21 861 38 73

✉ info@dentimed.ch

DENTIMED+
A Swiss Hygiene
Company